

ChairSide1™

by **ABraCadabra**
New age implantology



מבנה פשוט גאוני

תשכחו מדבק, תשכחו מברגים...

רטנציה טלסקופית אמיתית בהישג ידך!

← מתי בפעם האחרונה נתקלתם במטופל שחזר אליכם שוב ושוב (ושוב...) בתלונות על דבק שנשטף, בורג שהשתחרר, מבנה, שתל או גשר שנשבר?


← עם ChairSide1™ תוכלו להשאיר את כל הצרות מאחוריכם ולספק למטופלים שלכם את השיקום הטוב ביותר מבחינה ביומכנית—עם ישיבה חד-משמעית, מקבילות מושלמת ורטנציה טלסקופית מדהימה.



ChairSide1™ מבית ABraCadabra הוא מבנה גאוני המתאים לכל שתל, בכל עמדה ובכל זווית, ולכל סוגי השיקום—כתרים, גשרים ותותבות נשלפות.

יציבות מובנית


ההנדסה המתוחכמת והמוגנת בפטנטים של ChairSide1™ בשילוב עם החומרים בהם אנו משתמשים יוצרים, לראשונה בעולם, שיקום המותאם לכוחות הביומכניים הפועלים בחלל הפה, המגן על השתל והרקמות הסובבות מפני מתח, שחיקה ושברים.

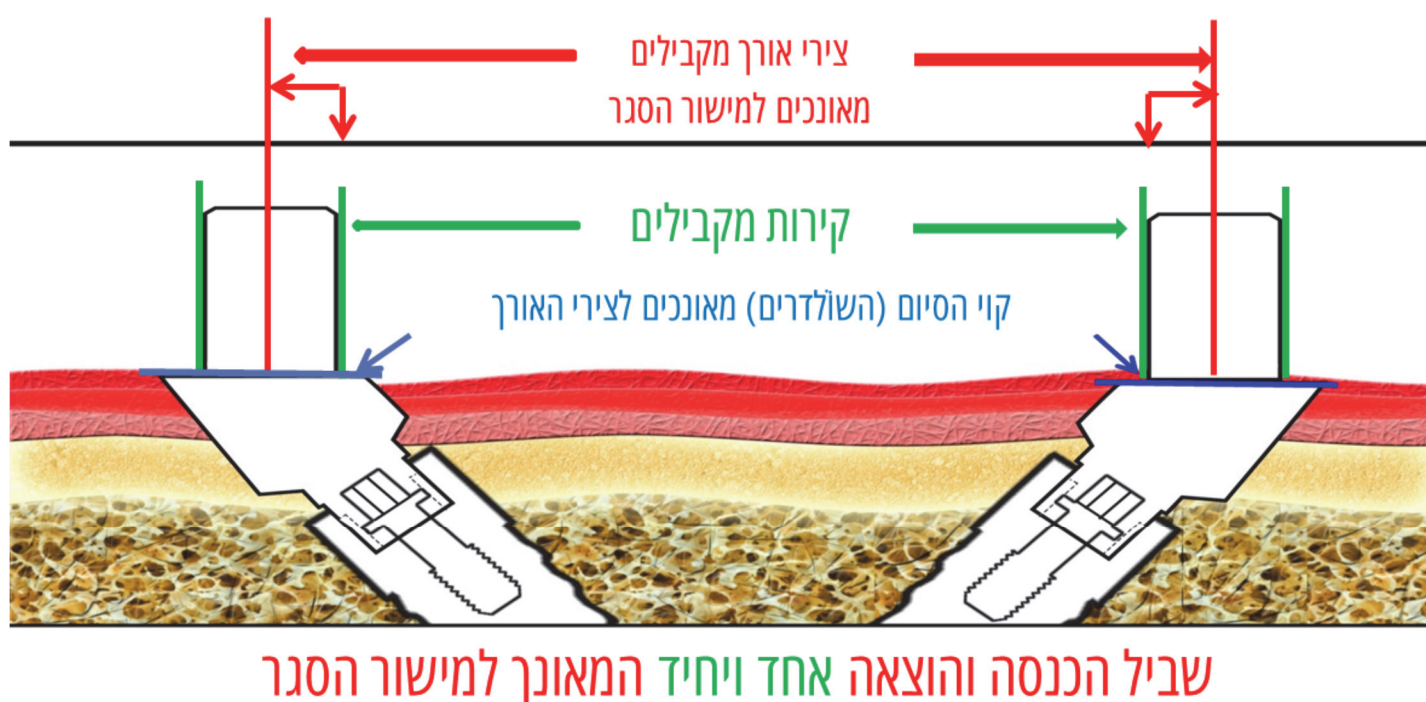

הפשטות של שיקום על-גבי שתלים




עם ChairSide1™ שיקום על-גבי שתלים כבר לא חייב להיות עסק מסובך. כבר אין צורך לבחור מקטלוג המכיל מאות חלקי שיקום שונים. **תשכחו ממבנים זוויתיים, ברים חרוטים, לוקייטורים ומולטי-יוניטים. יש רק מבנה אחד המספק פתרון מושלם לכל אתגר שיקומי.**

מקביליות מושלמת וטלסקופיה אמיתית

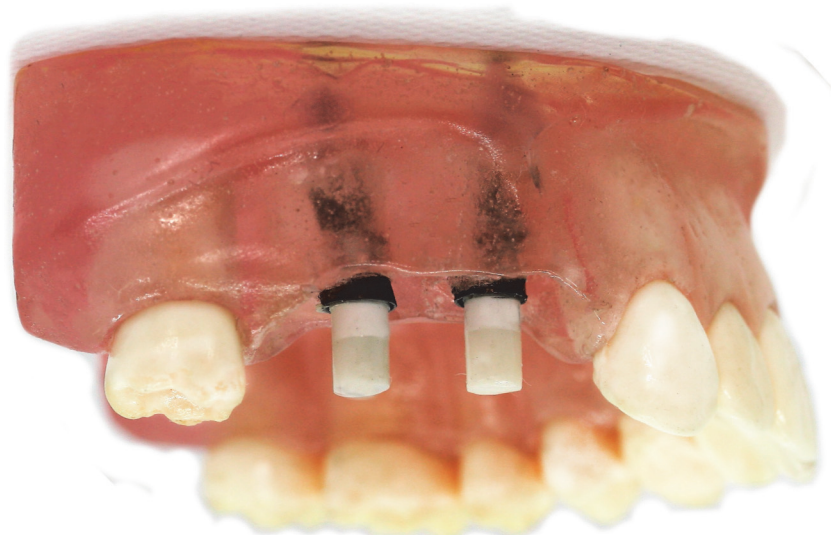

Chairside1™ מתאים לשתלים בכל הטייה ויוצר מבנים במקביליות מושלמת זה לזה.

המבנה הצילינדרי של המבנים וקירותיהם המקבילים לחלוטין מאפשרים יצירה של שיקום טלסקופי אמיתי ומדויק, לרטנציה מושלמת ללא דבק וברגים—אך עם אפשרות להוצאה בעת הצורך.

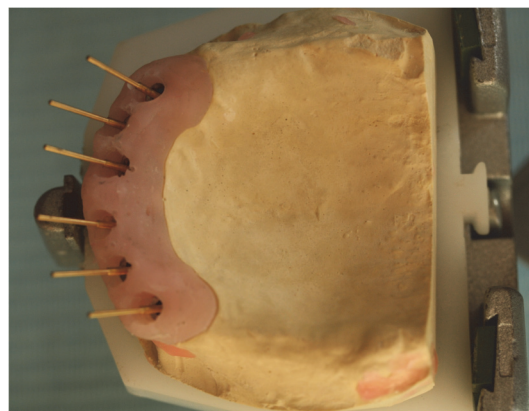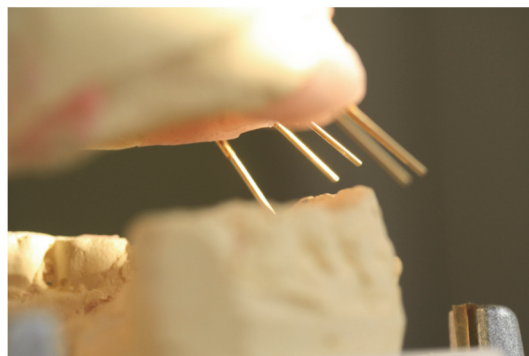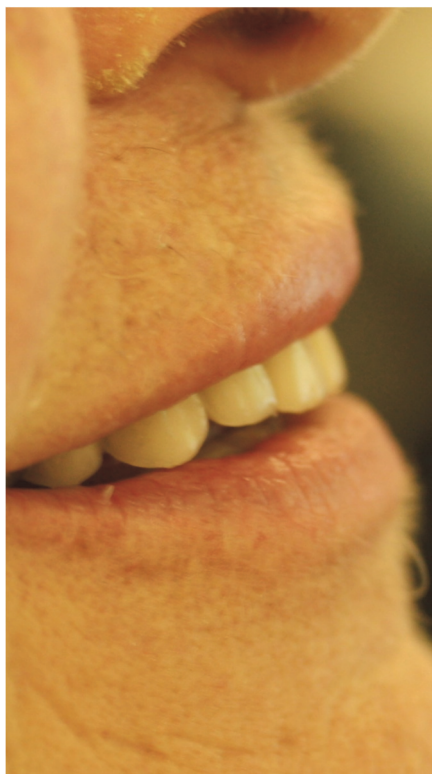

מהיום, עם Chairside1™, כל רופא שיניים יכול להגיע לתוצאות שיקומיות נהדרות אפילו במקרי השיקום הקשים והמורכבים ביותר.

ABraCadabra
New age implantology

תוצאה שיקומית מושלמת—בקלות!

עבודה בשיתוף עם מעבדת שיניים דיגיטלית הופכת את השיקום עם **Chairside1™** לפשוט עוד יותר— כל שנותר לך לעשות הוא לשלוח מטבע עם אנלוגים למעבדה ולקבל ערכה המכילה את כל הדרוש להתקנת המבנים והשיקום כבר בביקור הבא של המטופל.



2. הדפסת סד קליני להזרקת האבטמנטים



1. הכנת בסיסי האבטמנטים ע"ג מודל מודפס



4. שלד מתכת מודפס עם כיפות טלסקופיות.



3. סד ההזרקה המודפס ממתכת—נשמר במשך שנים ומשמש לשחזור המבנים במידת הצורך.




6. גשר זמני מודפס—נותר רק להסיר עודפים ולהדביק את שלד המתכת!




5. שלד המתכת על-גבי מודל במעבדה, המדמה את צורת המבנים הסופית בפה המטופל.


9 שלבים פשוטים לשימוש במוצר

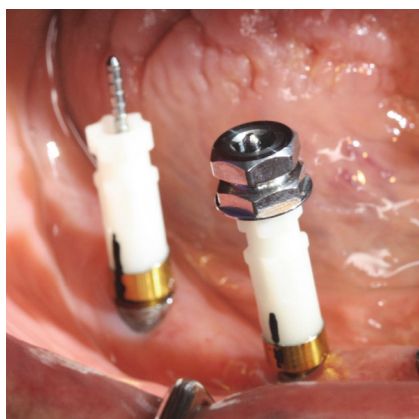


3. הושב את בסיסי המבנים בפה המתרפא בהתאם למיקומם המדויק על-גבי המודל.

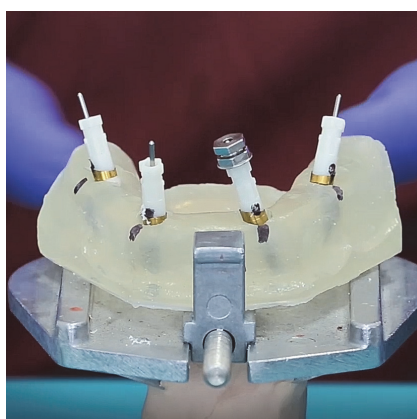

2. קבל מן המעבדה מודל עם מבנים המוכנים להושבה בפה + שיקום כבקשתך.

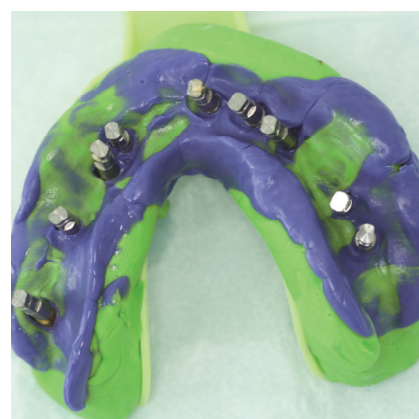


1. שלח אל מעבדה העובדת עם Chairside1 מידה עם אנלוגים מחוברים.

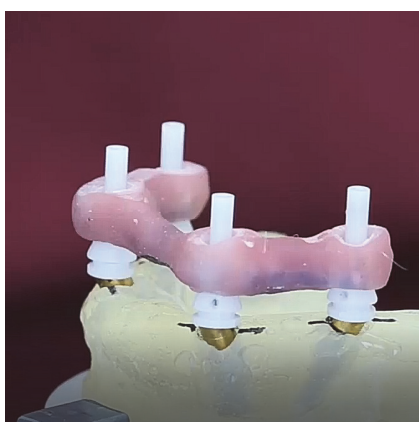


6. התקן את סד ההזרקה על גבי השרוולים לקבלת מקבילות מושלמת.




5. התקן את שרוולי ההזרקה על-גבי הפוסטים.

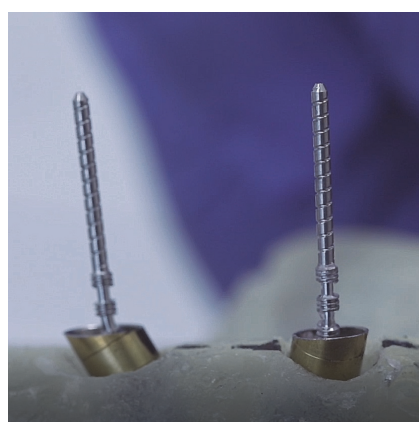


4. הברג וכופף את הפוסטים המתכתיים המשמשים גם כברגי אחיזה למבנה.

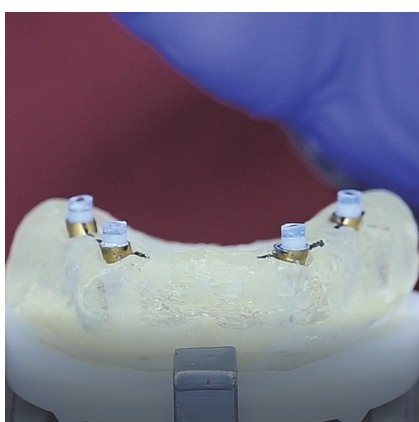

9. התאם את גובה המבנים והמשך לשלב הושבת השיקום.

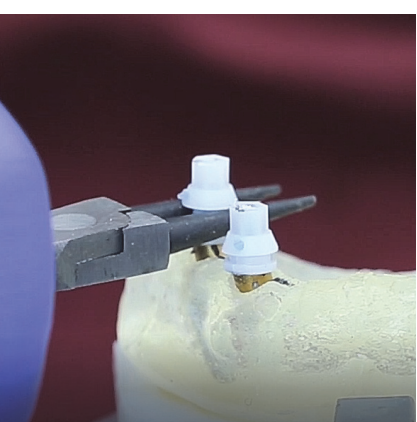

8. הסר את הסד, חתוך והסר את שרוולי ההזרקה.

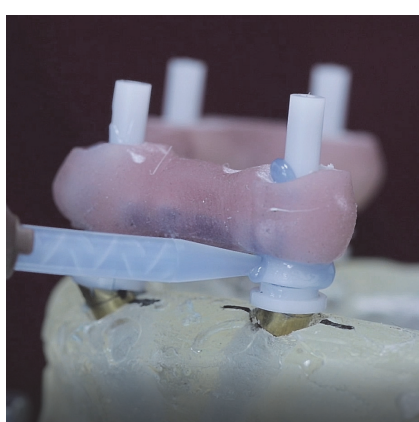


7. הזרק קומפוזיט נוזלי בעל הקשייה כפולה והמתן להתקשות.

סיכום יתרונות Chairside1™

- ← **מותקן בקלות**, ממש כמו מבנה קומפוזיט רגיל.
- ← **מתקן כל זווית הטיה של השתל.**
- ← **יוצר מקביליות מושלמת** בין המבנים ללא תלות במספר השתלים.
- ← **מספק אחיזה טלסקופית** יציבה וחד-משמעית, **ללא צורך בדבק או ברגים.**
- ← **פותר את הכשלים הביומכניים** השכיחים בשיקום על-גבי שתלים—עם העמסה נכונה והושבה פסיבית.
- ← **מאריך את חיי השתלים והשיקום.**
- ← **חוסך זמן, כסף ועוגמת נפש למטופל ולרופא**—הן בתהליך ההתקנה הראשוני והן במניעת תקלות ושברים בהמשך.

מקרה קליני: שיקום לסת תחתונה על 3 שתלים בלבד (ד"ר י.סולדוחין, ישראל, 2018)

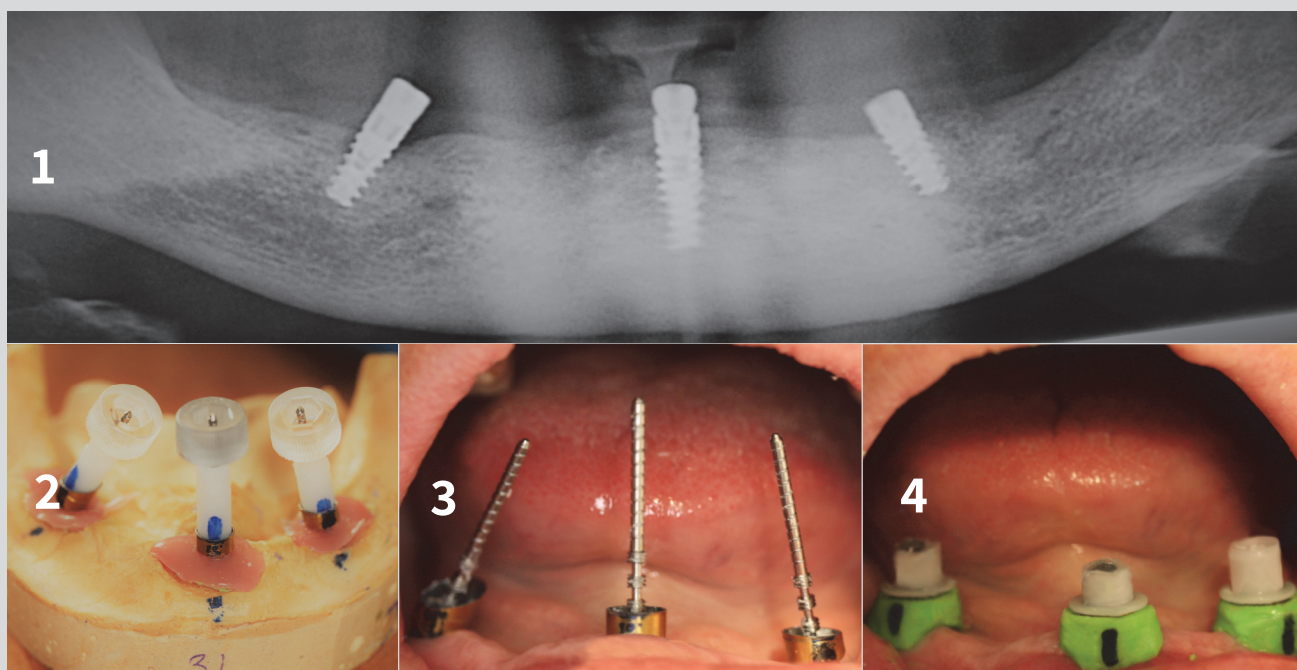

למידע נוסף על Chairside1™ ושאר מוצרי
ABraCadabra סרוק את הברקוד עם הטלפון הנייד שלך



ABraCadabra
New age implantology

כל הזכויות שמורות ל"אברקדברה אימפלנטס בע"מ". אין להעתיק או לשכפל ללא אישור מראש ובכתב מטעם החברה.