

PathfinderTM

by **ABraCadabra**
New age implantology



הרבה יותר מבורג כיסוי

“Second stage surgery is often overlooked and is considered non essential phase but actually could determine the health of the peri-implant tissue .This phase gives an excellent opportunity to preserve, reconstruct and even maneuver the soft tissue to optimize the soft tissue profile around the implant components.”

Suchetha A, Phadke PV, Sapna N, Rajeshwari H R. Optimising esthetics in second stage dental implant surgery: Periodontist's ingenuity. J Dent Implant 2014;4:170-5

“לפעמים, חשיפת השתלים מטרידה את מנוחתי יותר מההשתלה עצמה...”


ד“ר א.ג., ישראל



← מהיום כבר לא צריך לחשוש משלב חשיפת השתלים.

← מהיום כבר לא צריך לנחש את מיקום וכיוון השתל.


← מהיום יש בידיכם כלי פשוט וחכם שיהפוך כל חשיפה לקלה ופשוטה.

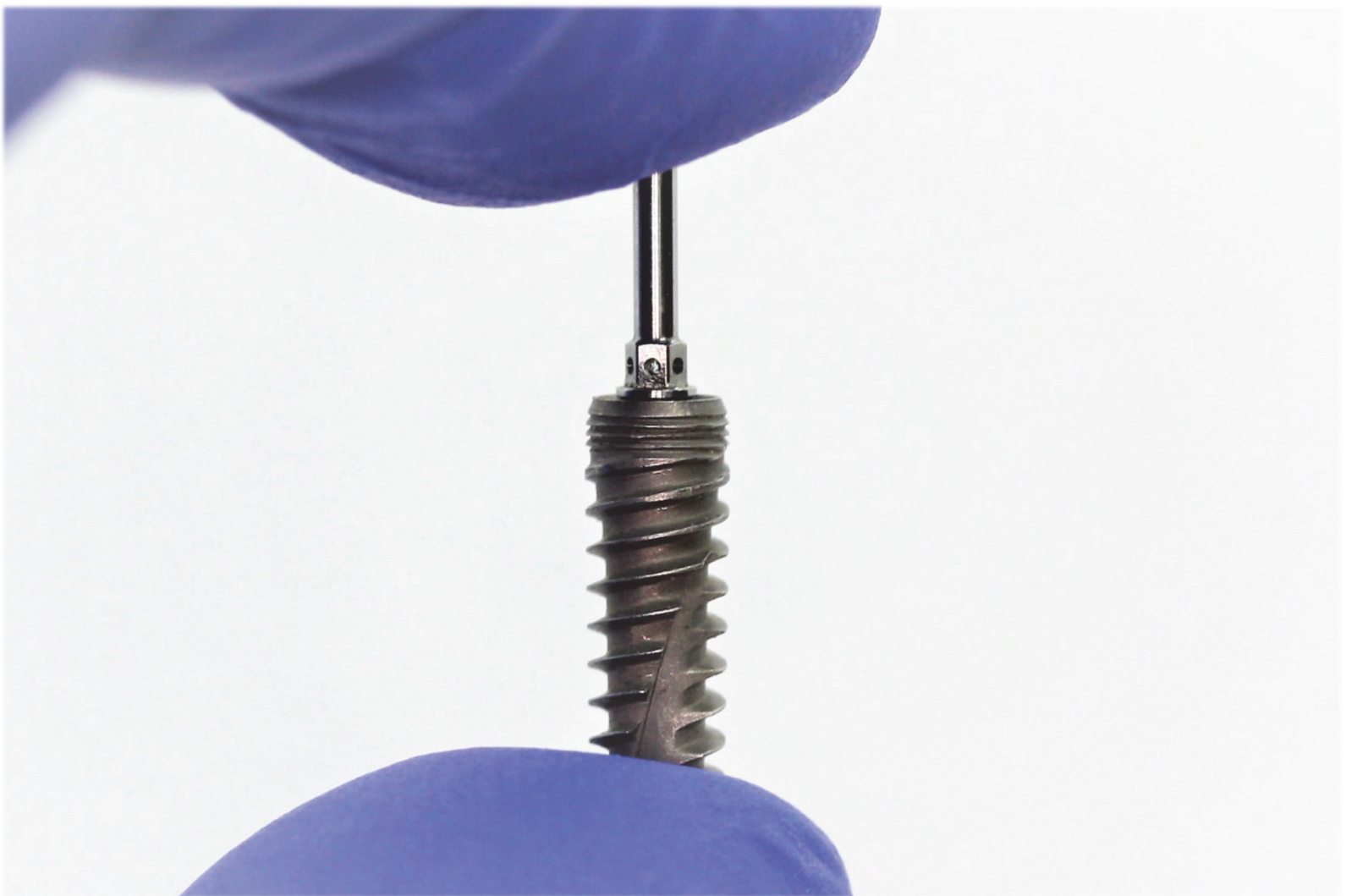

Pathfinder™ מבית ABraCadabra הוא בורג כיסוי מהפכני, שהופך את חשיפת השתלים למהירה, בטוחה ונטולת כאבים.

ללא כאבים, ללא נזק

צינורית ההזרקה הייחודית של Pathfinder™ מאפשרת הזרקה ללא כאבים – הן של חומר האלחוש בטרם החשיפה, והן של תמיסות אנטיביוטיאליות במידת הצורך במהלך תקופת הריפוי. כל זאת ללא דקירות מיותרות וללא נזק לרקמת סב-השתל.

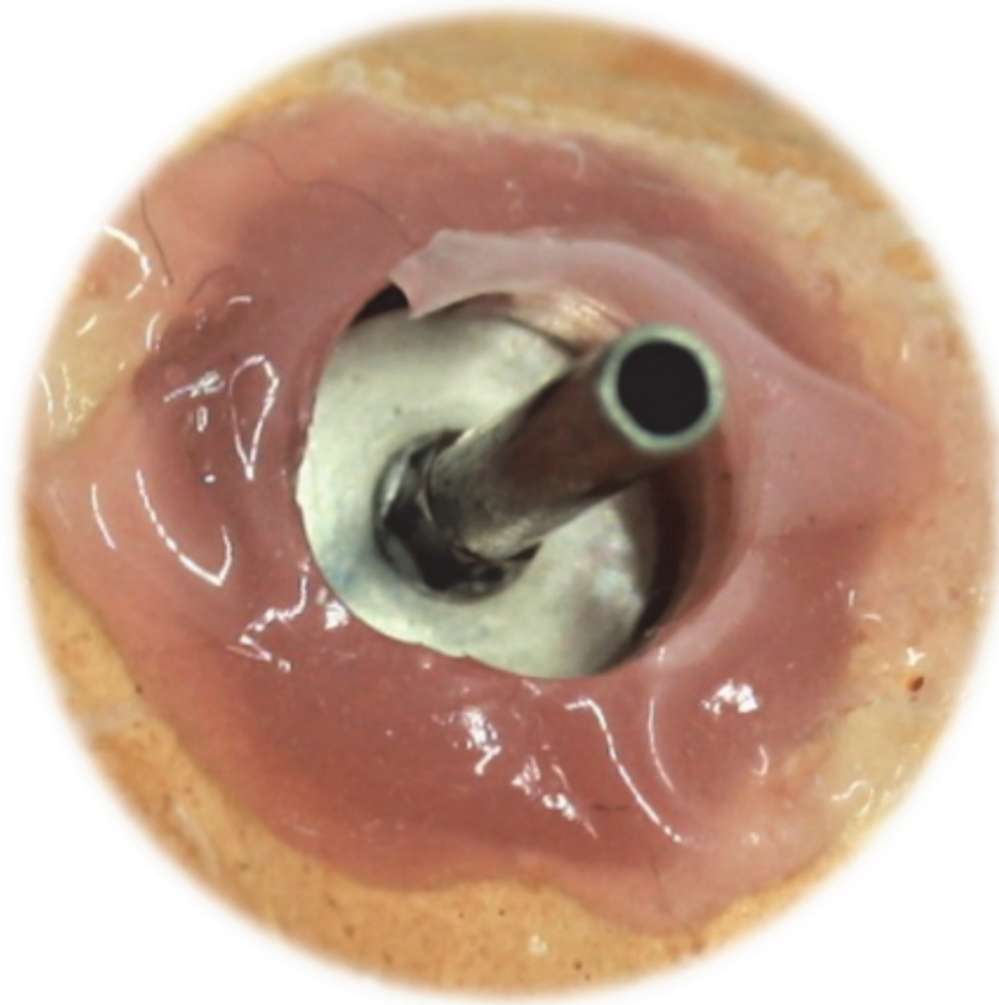

ללא חשש


עם Pathfinder™, כבר לא תצטרכו לחשוש מחשיפת השתלים ומאובדן הרקמה הנלווה.

המטופלים שלכם יודו לכם על טיפול מהיר ונטול כאבים, ואתם תודו לנו!

דיוק מובנה




מחורר החניכיים (פאנץ') של Pathfinder™ מתאים בדיוק מושלם לצינורית ההזרקה, כך שחירור הרקמה מתבצע בדיוק בכיוון השתל, תוך שמירה על רקמת החניכיים יקרת הערך.

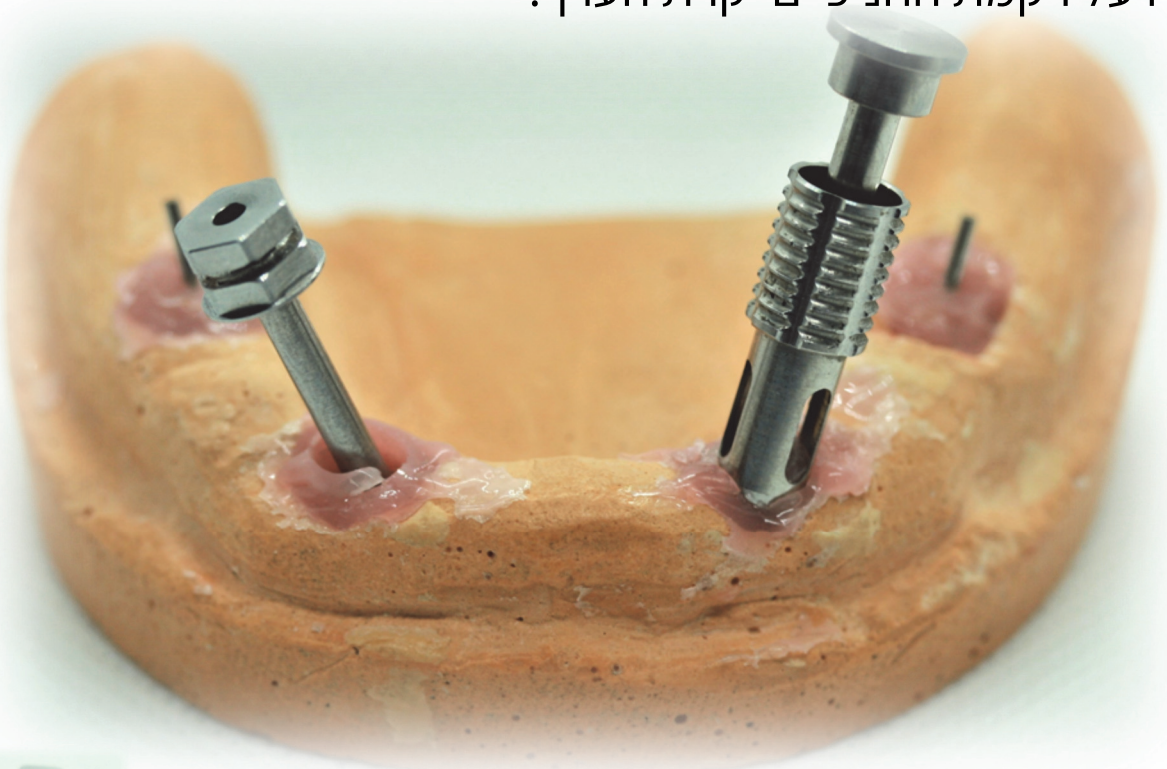

מעוניינים לא לאבד רקמה רכה כלל!? כעת זה אפשרי!
ניתן להוציא את ה- Pathfinder™ גם ללא חירור הרקמה,
באמצעות מפתח שתלים.

5 שלבים פשוטים לשימוש במוצר

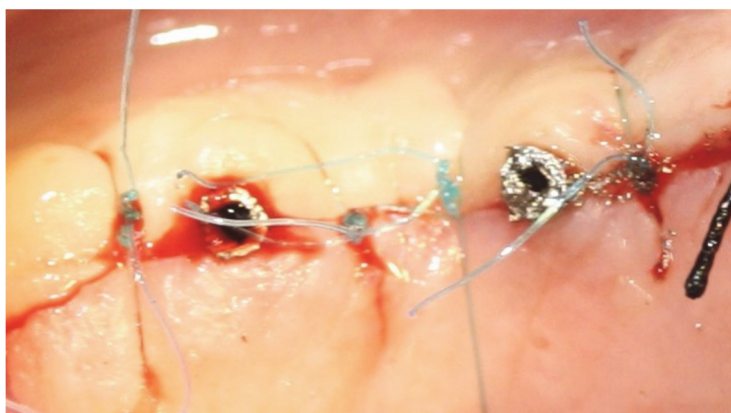

2. תפור והשתמש במקדח להסרת עודפי גובה של הצינוריות.




1. לאחר ההשתלה, הברג את ה-Pathfinder אל השתל.



4. השתמש בפאנץ' לחירור הרקמה הרכה בדיוק מקסימלי.



3. בטרם החשיפה, הזרק חומר אלחוש דרך הצינוריות.

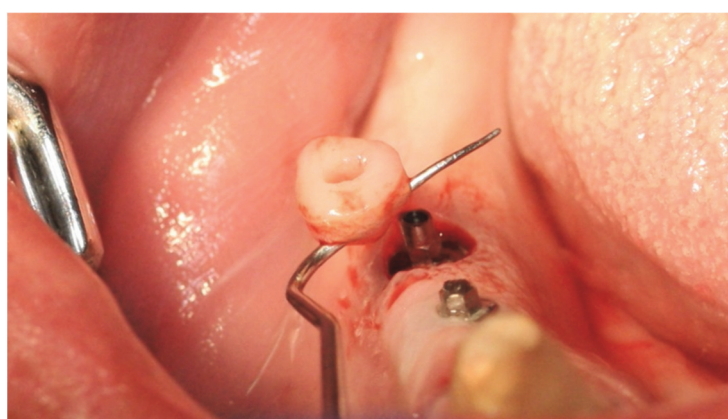


5. הסר את הרקמה הרכה החתוכה והברג החוצה את ה-Pathfinder


סיכום יתרונות Pathfinder™

- ← הופך את חשיפת השתלים לבטוחה, ודאית וצפויה.
- ← חשיפה ללא תפרים וללא צורך בתקופת ריפוי.
- ← שומר על העצם והרקמה הרכה.
- ← מאפשר אלחוש יעיל ללא הכאב הכרוך בזריקה.
- ← מאפשר הזרקה קלה ונוחה של תמיסות אנטיביוטיאליות ישר אל רקמת סב-השתל.
- ← מאפשר קיבוע ממברנות בקלות וביעילות.
- ← מאפשר קשירה של השתלים, במידת הצורך.
- ← מתאים לכל שתל בעל הברגה בקוטר 1.72 מ"מ, וכן לשתלים צרים עם הברגה בקוטר 1.5 מ"מ.
- ← חיסכון ניכר בזמן, כסף וכאב למטופל.
- ← מספק שקט נפשי לרופא ולמטופל.

מקרה קליני: חשיפת 8 שתלים ב-10 דקות (ד"ר א. גליקשטיין, ישראל, 2018)

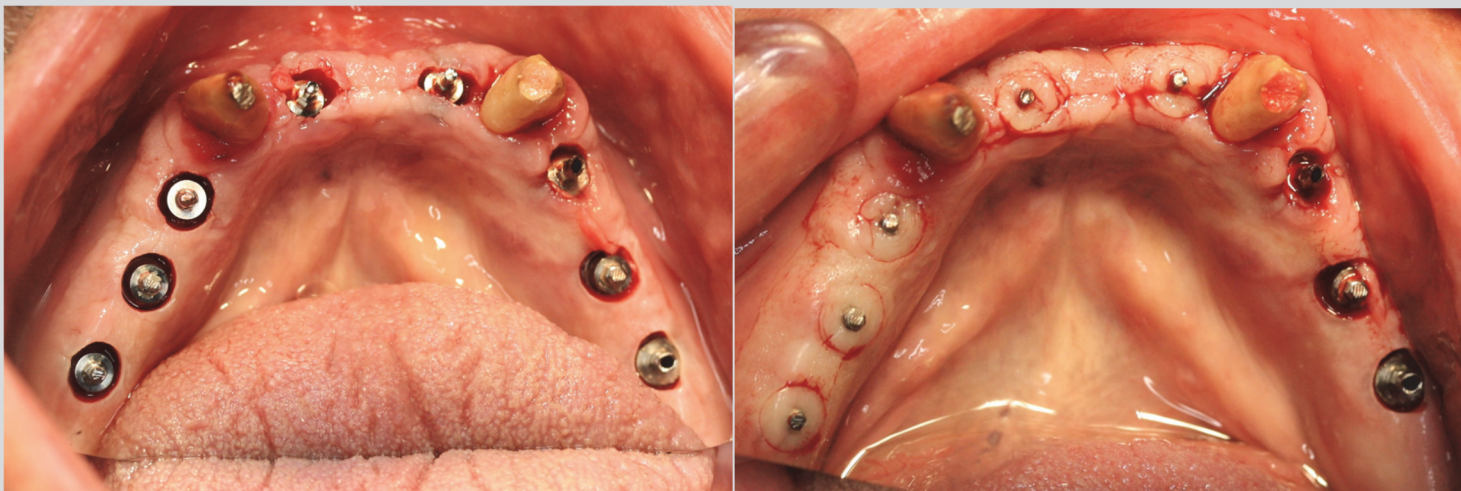

למידע נוסף על **Pathfinder** ושאר מוצרי
ABraCadabra סרוק את הברקוד עם הטלפון הנייד שלך

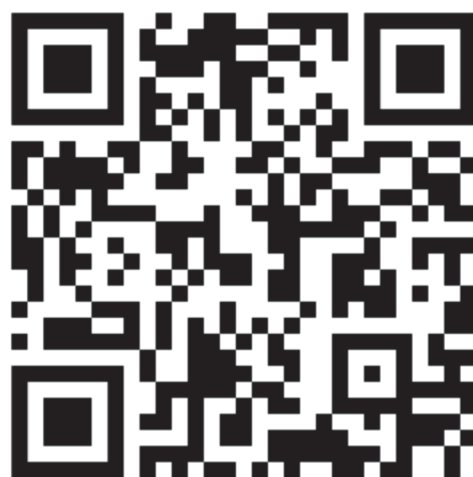

ABraCadabra
New age implantology

כל הזכויות שמורות ל"אברקדברה אימפלנטס בע"מ". אין להעתיק או לשכפל ללא אישור מראש ובכתב מטעם החברה.